

Einführung

Das Servo 3 ist ein Druckgeschiebe für Cover-Denture-Prothesen mit einem aktivierbaren Matrizeinteil. Die Matrize ist aus Silber-Palladium hergestellt und mit Retentionen versehen. Die Matrize kann entweder in rückstandslos verbrennbarem Kunststoff oder HSL zum Angießen an Edelmetall-Legierungen geliefert werden. Jedes Geschiebe wird mit einem Platzhalter und einem Silikonring geliefert.

Vorteile:

- einfache Anwendung
- sehr preiswertes Geschiebe für Hybridprothesen
- kleine Abmessungen
- aktivierbar
- Kugeldurchmesser 1,7 mm



Verarbeitung

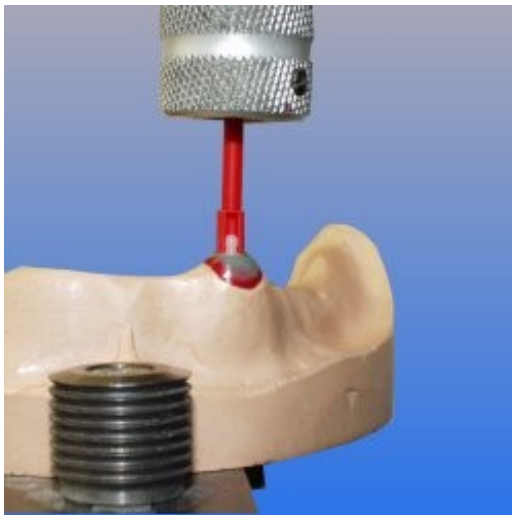


Abb. 1:

Wurzelkappe mit Wurzelstift so modellieren, dass die Okklusalfäche im rechten Winkel zur Einschubrichtung liegt. Matrize mit Hilfe des Parallelhalters in der vorgesehenen Einschubrichtung möglichst zentral auf der Wurzelkappe anwachsen.

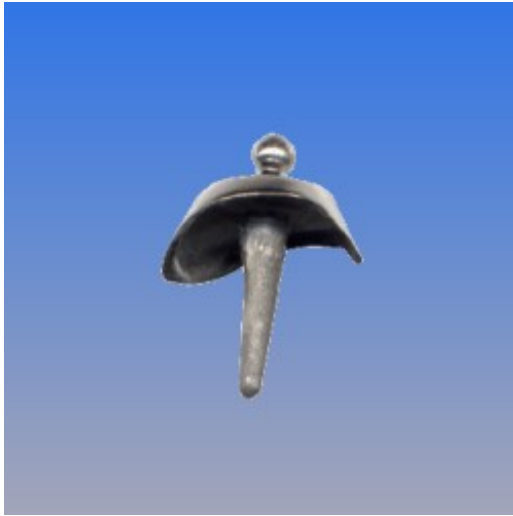


Abb. 2:

Wurzelstiftkappe wie gewohnt anstiften, einbetten und gießen.

Beim Ausarbeiten ist darauf zu achten, dass die Kugel vorsichtig und ohne bedeutenden Dimensionsverlust bearbeitet wird.



Abb. 3:

Dann wird der Platzhalter über die Patrizie gelegt und auf der Kappe und der Papille adaptiert. Der Platzhalter schafft den Raum, der für die Resilienzbewegung erforderlich ist.

Matrize auf der Patrizie positionieren. Beim Einbau mehrerer Matrizen sollte darauf geachtet werden, dass diese parallel zueinander angebracht werden.

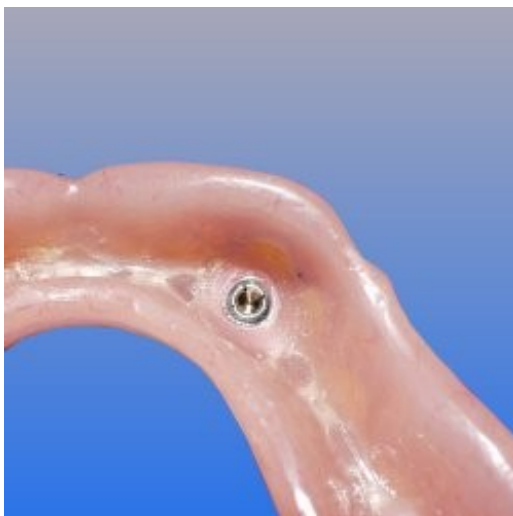


Abb. 4:

Den Silikonring bündig auf den Lamellenanteil der Matrize schieben. Die Ringnut der Matrize muss frei bleiben, denn sie dient als Retention für den Kunststoff. Unterschnitte und Papillenzwischenräume ausblocken. Isolieren und Prothese wie gewohnt polymerisieren.



Abb. 5:

Nach dem Polymerisieren wird der Platzhalter entfernt und die entstandene Kante beigeschliffen. Zur optimalen Funktion und zum Schutz der Lamellen sollte der Silikonring nicht entfernt werden.

Sets

Best.-Nr.:	3118	Patrize HSL Matrize Silber-Palladium
Best.-Nr.:	3119	Patrize Kunststoff Matrize Silber-Palladium

Einzelteile

Best.-Nr.:	3120	Matrize Silber-Palladium, einzeln
Best.-Nr.:	3121	Patrize HSL, einzeln
Best.-Nr.:	3122	Parallelhalter
Best.-Nr.:	3123	Aktivier- und Reaktivierinstrument

CE 0044

Servo-Dental GmbH & Co. KG
Rohrstraße 30
58093 Hagen-Halden
Fon: +49 (0) 23 31 / 95 91-0
Fax :+49 (0) 23 31 / 95 91-25
www.servo-dental.de
info@servo-dental.de